


Checkliste zur Patienten- vorbereitung bei der Anwendung von Elektrochirurgie



- 1 | Der Patient ist trocken und auf einer elektrisch isolierten OP-Tischauflage gelagert.



- 2 | Der Patient hat keinen Kontakt mit elektrisch leitfähigen Gegenständen (Infusionsständer, Schläuche, Kabel, etc.).

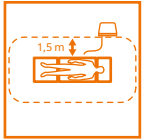

- 3 | Der Patient hat zum elektrochirurgischen Gerät einen Abstand größer als 1,5 m.



- 4 | An Bereichen von potenzieller Schweißbildung liegen trockene Tücher; Haut-zu-Haut-Kontakt bei Hautfalten oder Brustfalten werden vermieden.



- 5 | Bei langer Operationsdauer ist der Urin des Patienten durch einen Katheter abzuleiten.



- 6 | Eine geeignete Auflagefläche des Patienten ist sichergestellt, um Drucknekrosen zu verhindern.



- 7 | Dem Patienten wurden alle elektrisch leitfähigen Teile entfernt (Uhren, Ketten, Ringe, Piercings, Armbänder, entfernbare Zahnprothesen etc.).



- 8 | Die Neutralelektrode ist richtig am Patienten platziert.



- 9 | Bei Patienten mit Herzschrittmacher wurde vor der Anwendung ein Kardiologe konsultiert.



- 10 | Das OP-Feld ist frei von explosiven Gasen oder entzündlichen Flüssigkeiten und Materialien.

Achtung: Diese Checkliste ersetzt nicht den Verwendungshinweis. Aus den darin enthaltenen Informationen und Angaben lassen sich keine Ansprüche gegen BOWA-electronic GmbH & Co. KG ableiten. In Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, von den in diesem Dokument gemachten Angaben abzuweichen. Wenden Sie sich für die Geräteanweisungen an den für Sie zuständigen BOWA MEDICAL-Vertreter.

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Heinrich-Hertz-Strasse 4 - 10 | 72810 Gomaringen | Germany | Phone +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com