


Checklist para a preparação do paciente usando eletrocirurgia



- ✓ | O paciente está seco e posicionado em cima dum tapete eletricamente isolado da mesa cirúrgica.




- ✓ | O paciente não tem nenhum contato com objetos condutores de eletricidade (suporte de infusão, mangueiras, cabos etc.).

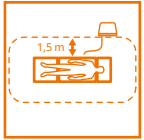

- ✓ | O paciente está a uma distância de mais que 1,5m do dispositivo eletrocirúrgico.



- ✓ | Panos secos estão colocados nas áreas de transpiração, contato pele com pele evita-se na área de peitos ou rugas de pele.

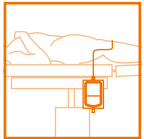

- ✓ | No caso que a cirurgia seja de tempo prolongado deve-se drenar a urina do paciente com um cateter.



- ✓ | Uma superfície de suporte adequado para o paciente impede uma necrose de pressão.



- ✓ | Todos os elementos condutores do paciente foram retirados (relógios, cadeias, anéis, piercing, braceletes, dentes removíveis etc.).



- ✓ | O eletrodo neutro foi colocado corretamente no paciente.



- ✓ | No caso dum paciente com marca-passos, um cardiologista foi consultado antes da aplicação.



- ✓ | A área cirúrgica esta livre de gases explosivos ou líquidos e materiais inflamáveis.

Atenção! Esse checklist não substitui o manual de instruções do equipamento. As informações e dados contidos nesse documento não geram nenhum direito de reclamação contra a BOWA-electronic GmbH & Co. KG. Algumas situações e circunstâncias individuais e especiais podem requerer a desvinculação das informações fornecidas nesse documento. Para instruções sobre como usar o equipamento, favor contatar o seu representante local da BOWA MEDICAL.