


Lista de comprobación para la preparación de pacientes que van a ser sometidos a electrocirugía



- ✓ El paciente debe estar seco y colocado en una mesa de operaciones aislada eléctricamente.



- ✓ El paciente no debe estar en contacto con objetos conductores de electricidad (soportes de infusión, tubos, cables, etc.).

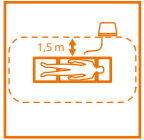

- ✓ El paciente debe estar a una distancia superior a 1,5 m de la unidad de electrocirugía.



- ✓ Se deben colocar paños secos en las zonas que puedan presentar sudoración; Evitar el contacto piel con piel en los pliegues de la piel o en los pliegues del pecho



- ✓ Si la operación se prolonga más de lo esperado, es necesario drenar la orina del paciente a través de una sonda.



- ✓ Asegurar una superficie de apoyo adecuada para el paciente con el fin de evitar la necrosis por presión.



- ✓ Todas las partes conductoras de electricidad deben ser retiradas del paciente (relojes, cadenas, anillos, piercings, pulseras, prótesis removibles, etc.).



- ✓ Es necesario colocar correctamente el electrodo neutro en el paciente.



- ✓ En el caso de los pacientes con marcapasos cardíacos, se debe consultar a un cardiólogo antes de la intervención.



- ✓ La zona de trabajo debe estar libre de gases explosivos o líquidos o materiales inflamables.

Atención: Esta lista de comprobación no sustituye a las instrucciones de uso. No podrán presentarse reclamaciones contra BOWA-electronic GmbH & Co. KG que puedan derivarse de la información y los datos aquí contenidos. Dependiendo de las circunstancias individuales, puede ser necesario desviarse de la información proporcionada en este documento. Póngase en contacto con su representante local de BOWA MEDICAL para obtener instrucciones.