

## Liste de contrôle relative à la préparation des patient(e)s en vue d'une intervention électrochirurgicale



- ✓ | Le/La patient(e) est sec(he) et se trouve sur une table d'opération isolée électriquement.



- ✓ | Le/La patient(e) n'est pas en contact avec des objets conducteurs d'électricité (pieds à perfusion, tuyaux, câbles, etc.).



- ✓ | Le/La patient(e) se trouve à une distance minimum de 1,5 m du dispositif électrochirurgical.



- ✓ | Des chiffons secs sont placés au niveau des zones éventuelles de transpiration ; les contacts peau contre peau sont évités au niveau des plis cutanés et mammaires.



- ✓ | En cas d'opération de longue durée, l'urine du/de la patient(e) est évacuée par le biais d'un cathéter.



- ✓ | Une surface de contact adéquate du/de la patient(e) est garantie afin d'éviter les escarres.



- ✓ | Tous les éléments conducteurs d'électricité ont été retirés du/de la patient(e) (montres, chaînes, bagues, piercings, bracelets, prothèses dentaires amovibles, etc.).



- ✓ | L'électrode neutre est positionnée correctement sur le/la patient(e).



- ✓ | Pour les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque, un cardiologue a été consulté préalablement à l'utilisation.



- ✓ | Le champ opératoire est exempt de gaz explosifs ou de liquides et matériaux inflammables.

**Attention :** cette liste de contrôle ne remplace en aucun cas les conseils d'utilisation. Les informations et les indications contenues ne permettent pas de faire valoir aucun droit à l'encontre de BOWA-electronic GmbH & Co. KG. En fonction de la situation individuelle, il peut être nécessaire de diverger des indications figurant dans le présent document. Pour les instructions relatives à l'appareil, adressez-vous à votre représentant compétent BOWA MEDICAL.