

Checklist per la preparazione del paziente in caso di utilizzo dell'elettrochirurgia



✓ | Il paziente ha la cute asciutta ed è posizionato su un tavolo operatorio con materassino elettricamente isolato.



✓ | Il paziente non è in contatto con oggetti elettricamente conduttivi (aste portaflebo, tubi, cavi ecc.).



✓ | Il paziente si trova a una distanza di oltre 1,5 m dal dispositivo elettrochirurgico.



✓ | Nelle aree soggette a traspirazione potenzialmente intensa sono allocate teli asciutti; evitare il contatto cute-cute in corrispondenza di pieghe cutanee o mammarie.



✓ | In caso di interventi di lunga durata, l'urina del paziente deve essere fatta defluire tramite un catetere.



✓ | Per evitare l'insorgenza di necrosi da pressione, viene garantita un'adeguata superficie di contatto del paziente.



✓ | Tutti gli oggetti del paziente elettricamente conduttivi sono stati rimossi (orologi, collane, anelli, orecchini e piercing, bracciali, protesi dentarie amovibili ecc.).



✓ | L'elettrodo neutro è applicato correttamente al paziente.



✓ | Per i pazienti con pacemaker, prima dell'uso è stato consultato un cardiologo.



✓ | Il campo operatorio è privo di gas esplosivi o liquidi e materiali infiammabili.

Attenzione: la presente checklist non sostituisce le istruzioni per l'uso. Le informazioni e i dati in essa contenuti non potranno essere utilizzati per avanzare pretese nei confronti di BOWA-electronic GmbH & Co. KG. In casi o circostanze particolari potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato nel presente documento. Per indicazioni in merito ai dispositivi, rivolgersi al rappresentante BOWA MEDICAL di riferimento.